

真空採血管 多管採血順序表

Order of Draw for Multiple Tube Collection

頭蓋顏色 安全頭蓋/傳統頭蓋 Color Code Hemogard / Conventional	添加劑 Additive	翻轉次數 Inversion	檢測 Determination
1 	血液培養血瓶 Blood Culture Bottle		
2  淺藍色 Light Blue	<ul style="list-style-type: none"> 0.105M / 0.109M 檸檬酸鈉 (~3.2%) Na Citrate 	3 - 4	凝固檢測 Coagulation
3  金色 Gold 迷彩頭 Red/Gray	<ul style="list-style-type: none"> 促凝劑與分離膠(SST) Activator & Gel Separator 	5	生化血清檢測 Chemistry
 紅色 Red	<ul style="list-style-type: none"> 促凝劑(塑膠) Activator (Plastic) 	5	生化、血清學， 與血庫檢測 Chemistry, Immunology & Blood Bank
4  淺綠色 Light Green 迷彩頭 Green/Gray	<ul style="list-style-type: none"> 鋰肝素與分離膠(PST) Li Heparin & Gel Separator 	8	生化血漿檢測 Chemistry
 綠色 Green	<ul style="list-style-type: none"> 鋰肝素 Li Heparin 鈉肝素 Na Heparin 	8	生化血漿檢測 Chemistry 特殊檢測 Special Test
5  紫色 Lavender	<ul style="list-style-type: none"> 噴霧乾燥 K₂EDTA K₂EDTA Spray-Dried 	8	完整血液學 與血庫檢測 Hematology & Blood Bank
6  灰色 Gray	<ul style="list-style-type: none"> 氟化鈉/草酸 NaF / Oxalate 氟化鈉/Na EDTA NaF / Na EDTA 	8 8	血糖檢測 Glucose

Reflects Change in CLSI Recommended.
Order of Draw CLSI H3-A6, 2007 Version 6